

Hoe voer ik een patiëntentest uit op de Accu-Chek Inform II ?

Versiedatum: 11 mei 2016
Ziekenhuis Maas en Kempen


1. Zet het toestel aan



2. Na de functietesten druk op 



3. Scan uw gebruikersID in

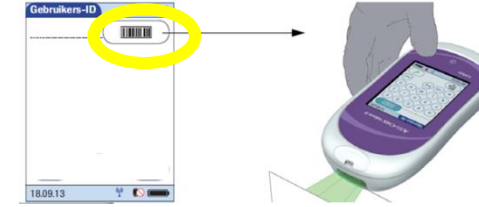


4. Druk op patiëntentest



5. Scan de patiëntenID in



6. Druk op "Glucosetest"

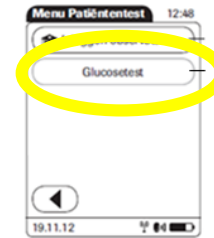


7. Scan de barcode van het potje strips in




8. Plaats de strip in het toestel



9. Wanneer de druppel verschijnt op het scherm breng dan bloed aan

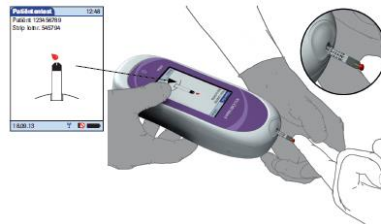

10. Na 5 sec verschijnt het resultaat, eventueel kan u een opmerking meegeven zoniet valideert u het resultaat

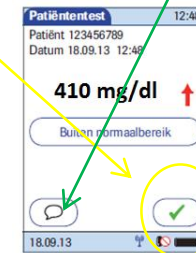

Hoe voer ik een controletest uit op de Accu-Chek Inform II ?

Versiedatum: 11 mei 2016
Ziekenhuis Maas en Kempen


1. Zet het toestel aan



2. Na de functietesten druk op 



3. Scan uw gebruikersID in

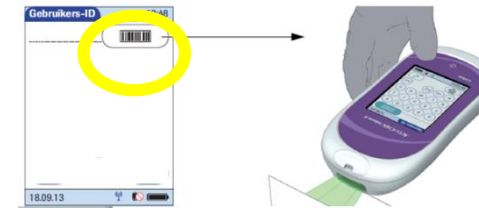

4. Druk op Controletest





5. Scan de barcode in op het controleflesje dat u wilt gaan uitvoeren




6. Scan de barcode van het potje strips in





7. Plaats de strip in het toestel

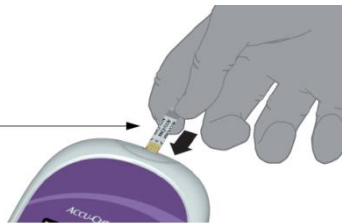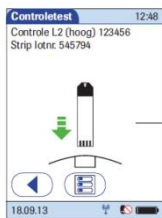

8. Wanneer de druppel verschijnt op het scherm, breng dan controlevloeistof aan (flesje goed mengen). Toestel plat op tafel leggen.

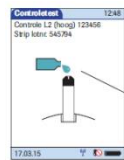

9. Na 5 sec verschijnt het resultaat, bij Pass valideert u het resultaat/ bij Fail geeft u eerst een opmerking in

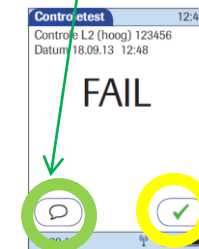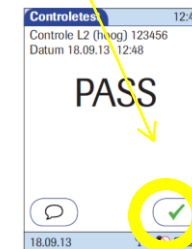

Belang van een juiste vingerprik: de pre-analytische fase!

Versiedatum: 11 mei 2016
Ziekenhuis Maas en Kempen

1) De verpleegkundige

- Voor de eerste patiënt:
 - De verpleegkundige wast z'n handen (water en zeep) en droogt deze grondig af (suikerresten verwijderen).
- Tussen 2 patiënten opnieuw handen wassen en goed afdrogen.
- !! Alcogel verwijdert niet elk glucosespoor op de handen, het ontsmet alleen !!

2) De gebruiker wast de handen van de patiënt

- Ideaal : de handen van de patiënt goed wassen met water en zeep nadien goed afdrogen, ook 's nachts.
- Alternatief : maak de vingertop nat d.m.v. een met water doordrenkt onsteriel compres (nieuw per patiënt) gebruik eventueel mini plasco – water (slechts 1 dag gebruiken na openen) nadien goed afdrogen met een onsteriel compres (nieuw per patiënt), ook 's nachts.
- Let op bij transpiratie, steeds dient de prikplaats goed droog te zijn !
- !! Alcogel, noch alcohol, noch ether gebruiken. Gezien deze geen suikerresten verwijderen

3) Hoe bekomt men een goede bloeddruppel ?

- Druk niet op de vingertop of knijp deze niet samen. Hierdoor maak je de onderliggende rode bloedcellen stuk, hierin zit ook suiker en dit kan dus het resultaat beïnvloeden. Als de gebruiker moeilijkheden ondervindt om een bloeddruppel te bekomen, dient hij de vinger te masseren vertrekkende vanuit de handpalm richting vingertop. Indien mogelijk de arm naar beneden laten hangen.

4) Bloedaanbreng

- Laat de teststrook het bloed via capillariteit opzuigen. Druppel niet aanbrengen OP de teststrook.
- De meting zal pas beginnen als er voldoende bloed is aangebracht.
- Slechts 0,6 µl bloed nodig.
- Na openen van het potje strips dient u het potje onmiddellijk terug te sluiten anders worden de strips te vochtig en krijgt u een error melding dat u met die strip niet kan verder werken.

